

Tuberna är en förbrukningsvara köps separat från Air Liquid.
Till DUO CRYO VET passar storlekarna B10, B20 och B13,4.
Munstycket kan även anslutas till de mindre tuberna (1 och 5 kg) och bärs upp och ned (eftersom dessa saknar stigarrör) i till exempel en ryggsäck.

Munstycke, vagn och termometer väger ca 5 kg tillsammans. Totalvikten beror sedan på vilken tub som används.

Alla tuberna är av aluminium för att vara så lätta som möjligt. Välj den tub som passar bäst med tanke på vikten.

B10 väger 16 kg+7,5 kg CO² = 23,5 kg

B20 väger 23 kg+15 kg CO² = 38 kg



Box 1147
181 23 Lidingö
Besöksadress. Tryffelslingan 8
Tfn: 08-767 58 50
Fax: 08-731 90 09
www.medicalmarket.se
info@medicalmarket.se



KRYOTERAPI för hästar

-när du vill hjälpa din häst på traven

UNIK NONINVASIV METOD
Används framgångsrikt
internationellt

DUO CRYO VET

DUO CRYO VET- intensiv kyla

Intensiv kyla får kroppen att själv påskynda läkningen. Vid en skada uppstår ofta en blödning i vävnaden som i sin tur orsakar svullnad. Kliniska studier har visat att skadetiden förkortas och läkning underlättas om man kyler ner skadan så fort som möjligt efter att den uppstår. Blodkärlen drar då ihop sig varpå blödningen avtar. Efter det att avkylningen avslutas sätter kroppen igång att värma upp det aktuella området. Blodcirkulation ökar och läkningen påskyndas genom att överflödiga vätska och slaggprodukter transporteras därifrån.



Travstjärnan Jag de Bellouet blir regelbundet behandlad med kryoterapi av sin tränare Christophe Gallier

DUO CRYO VET — så fungerar den

Maskinen består av ett pistolliknande munstycke som ansluts till en gastub. Med munstycket skjuts -78°C CO_2 (koldioxid) ut med högt tryck under kort tid. I utrustningen ingår även en mobil vagn som är avsedd för stallet, en infraröd termometer som används till att hitta inflammationen, detaljerade instruktioner om hur utrustningen skall användas och internationella vetenskapliga studier från veterinärer inom trav, galopp, hoppning och dressyr.

DUO CRYO VET kan användas till att behandla hematom, smärta, hälta, inflammation, muskel- och ledvärk.



DUO CRYO VET — unik metod från Frankrike

Metoden att behandla hästar med stark nedkylning är unik och kommer ifrån Frankrike. Där har den använts med stor framgång på **Jag de Bellouet**, vinnare av **Prix d'Amérique**. Cryonic tillverkar DUO CRYO VET för hand och kontrollerar att varje instrument håller toppklass.

DUO CRYO VET — finns det biverkningar?

Det är viktigt att hela tiden svepa med munstycket och att inte spruta på ett och samma ställe.

I utrustningen ingår en termolaser som mäter hudtemperaturen. Den skall riktas mot det ställe som behandlas. Bäst effekt uppnås när hudtemperaturen är 4° . Hudtemperaturen skall aldrig understiga 2° .

Munstycket riktas mot skadan och koldioxiden levereras i ett jämt tempo med svepande rörelser under ca 45 sekunder.

